


## Aplikace Hcel® v obrázcích

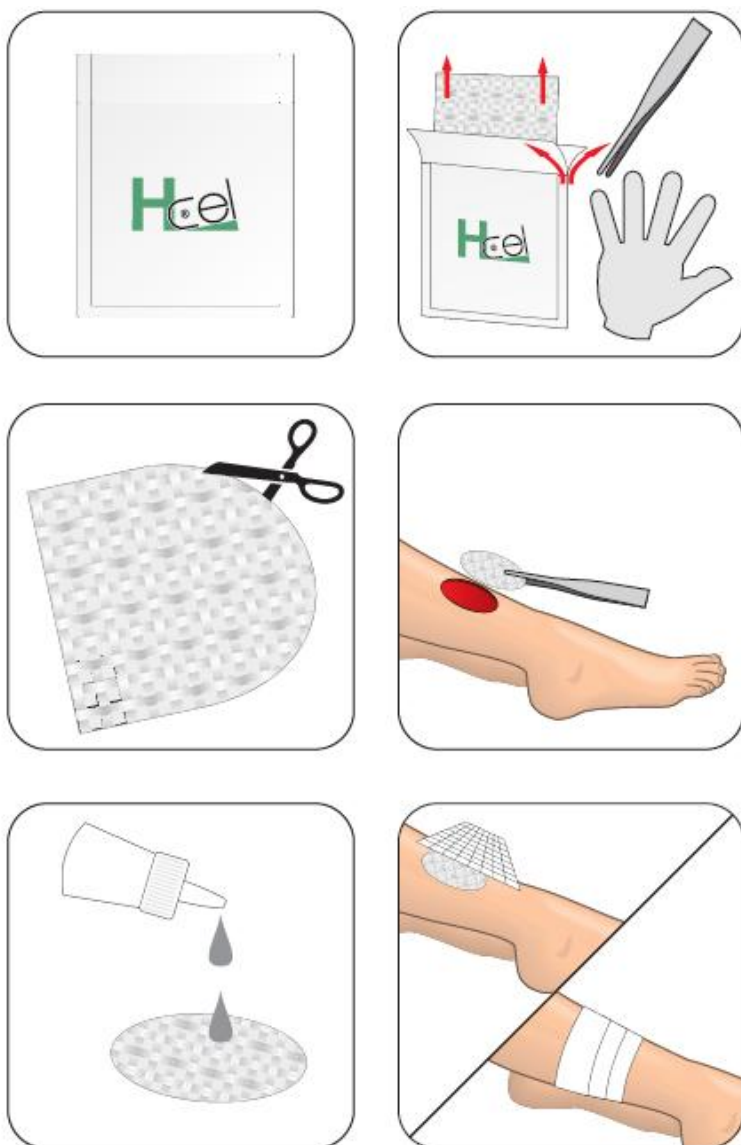

**Před aplikací krytí Hcel® se seznamte s detailním návodem k použití (pro každý produkt).**

Před přiložením krytí Hcel® je nutné odstranění nekrotických hmot a očistit oblast rány vhodným prostředkem na čištění ran. Krytí by mělo přesahovat rány o ½ cm. Pro silně secernující rány se krytí přikládá přímo na ránu a toto krytí se překryje vhodným krycím materiálem. Pro suché nebo slabě secernující rány je vhodné krytí navlhčit sterilním fyziologickým roztokem a to pouze nad oblastí rány a použít vlhkost zadržující krycí materiály. Zvlhčení je nezbytné po celou dobu hojení rány. Doporučené převazy: třikrát týdně, v konečné fázi hojení ran 2x týdně.

Výrobce: Holzbecher, spol. s r. o. barevna a bělidlo Zlích, 552 03 Česká Skalice,  
CE 1023, DATE OF REVISION: 2013-08-12  
WWW.HOLZBECHER.NET